

# PressureGuard

## PressureGuard Vendemadrass med dynamisk funksjon

PressureGuard har vært en industriledende terapeutisk løsning i mer enn et tiår i USA, mye basert på dets dokumenterte overlegenhet kontra vanlige antidecubitus løsninger. Et nytt trekk og ny kontrollenhet gir enda bedre friksjonsreduksjon, behandlingsfleksibilitet, ergonomi for pleiepersonell og ikke minst: pasientkomfort.

Noen av madrassens viktigste funksjoner er:

### Sikkerhetskant

Som sikrer forflytning ved å minimere risikoen for fall og klem, og gir økt stabilitet ved forflytning inn og ut av seng.

### Unik Geo-Matt® Design

Som skaper anti-friksjonsoverflate med 800 individuelt responderende celler, samtidig som skummet gir økt komfort til bruker.

### Nedunket hælparti for hælene

Som redistribuerer trykket til leggene og gir en komplett fotsupport


### 4 funksjoner for økt behandlingsfleksibilitet

Som gir pleiepersonell valget mellom (1) *Alternierende trykk (Dynamisk funksjon)* uten ekstreme trykkgraderinger, (2) *Lateral roteringsterapi (vendefunksjon)*, en allsidig modul beregnet på en rekke pasientbehov, (3) *Statisk (float) funksjon* som stopper alternering, mens den opprettholder konstant ideelt trykk og (4) *Tidsbegrenset Autofirm* for forenklet pasientpleie og -forflytning.



### Enkel og intuitiv kontrollenhet


Lettvektig og stillegående (30 desibel) pumpe som er meget brukervennlig og intuitiv. Lys og lydalarm for lavt trykk og strømbrudd. 30 minutters automatisk tilbakestilling ved bruk av Auto Firm. Velg mellom Vende-, Dynamisk, Autofirm eller Statisk modus. Det er i tillegg mulig å

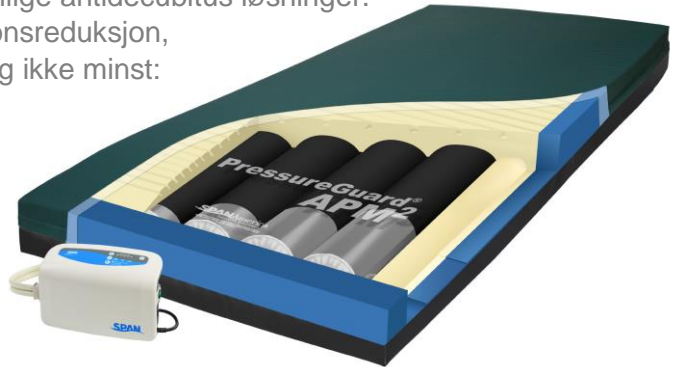

PressureGuard kan veksle mellom dynamisk funksjon og vendefunksjon ved et enkelt tastetrykk. Vendemadrass egner seg godt for trykksårforebygging og –behandling opp til og med sårgrad 4. Madrassen egner seg godt for pasienter med nedsatt bevegelighet, og nedsatt lungekapasitet. Vendemadrasser har enda større trykkavlastende effekt enn dynamiske madrasser, da man avlaster en hel side på pasienten om gangen. Vendemadrasser eliminerer helt behovet for et snuregime, noe man må ha ved bruk av statiske og dynamiske madrasser.

PressureGuard vendemadrass har tre "Shear Transfer Zones" innebygget i trekket for å optimalisere forflytning. Sammen med Geo-Matt overflaten gir disse sonene ekstra beskyttelse mot friksjon. På undersiden av trekket er et friksjonsminimerende stoff, som best kan beskrives som et innebygget "skilaken". Det unike designet hjelper for å:

1. Forhindre at hæler, sete og hode "graver" seg ned i overflaten.
2. "Gli" brukeren tilbake til opprinnelig posisjon etter å ha hevet/senket hjertebrettet.
3. Beskytte mot skadeeffektene av mikro-, makro-, og rotasjonsfriksjoner.
4. Gi pasientstabilitet ved å overføre friksjon til friksjonstolerante ankerpunkter.

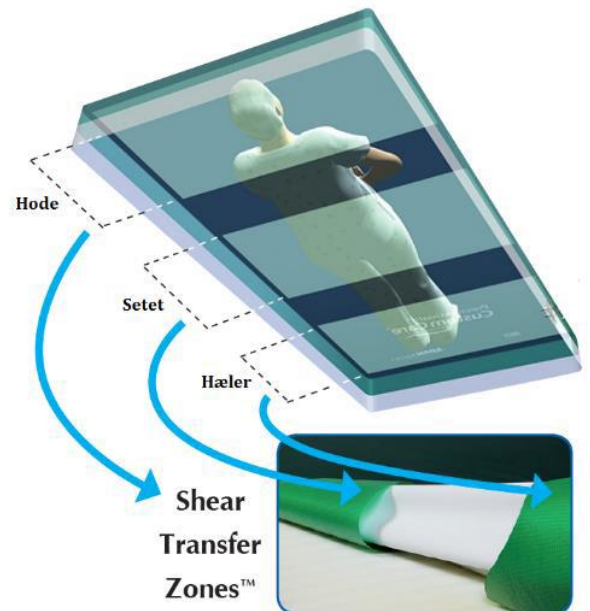

Inkontinenstrekket er temperaturregulerende og pustende, anti-mikrobiell, anti-sopp behandlet, samt flammehemmende. Trekket kan desinfiseres med godkjente desinfeksjonsmidler.

### Vendefunksjon

PressureGuard sin vendefunksjon vender brukeren 30 grader til hver side i en 10 minutters syklus. Dette vil si at fra -30 grader til 30 grader bruker den 10 minutter, samt at den tar en pause på ett minutt på midten.

Artikkelnummer	Beskrivelse	Dimensjon
5875LR-29	APM2 med digital kontrollenhet	190x90x18 cm
5880LR-29	APM2 med digital kontrollenhet	203x90x18 cm
5884LR-29	APM2 med digital kontrollenhet	213x90x18 cm
5900	Digital kontrollenhet	
Trekk: Antimikrobiell, anti-mugg og flammehemmende inkontinenstrekk		
Kontrollenhet:	Vekt 2,8 kg	Mål: 90,5x19x13 cm
	Volt 240	Maks. spenning 1.0 Amp
	Frekvens 60Hz	Sertifisert IEC 60601-1
Maks. brukervekt: 160 kg	Madrassens vekt: ca. 9 kg.	18 måneders garanti (alle deler)

### Forlengerslange

Det er også mulig å bestille en ekstra lang slange til PressureGuard madrassen. Standardslanger er 150 cm lang, mens den forlengede slangen er 300 cm lang. Dette kan være nyttig dersom man ønsker at bruker selv skal kunne gjøre innstillinger på pumpen, eller dersom man er veldig lydsensitiv og ønsker å plassere pumpen lengst mulig unna. Forlengerslangen har HMS artikkelnummer 236369, og produsentens artikkelnummer er 68613.