

RobinMedical



Trykkfordeling

Kjernen i madrassen er et luftkammer med en unik konstruksjon, som gir optimal støtte og trykkfordeling.

Justeringsmuligheter

Madrassens luftkammer justeres ved hjelp av håndpanelet til pumpen mens bruker ligger på madrassen. Håndpanelet har et display som viser fastheten i madrassen, og brukeren kan selv justere fastheten via håndpanelet. Hos pasienter med smerter og sårproblematikk kan det være særlig behov for å forandre fastheten i madrassen til stadighet.

Forflytningshjelpemiddel

Fra et mykt underlag, som avlaster og gir støtte, kan RobinAir justeres opp til et fast underlag ved forflytning og stell. Desto høyere tall på håndpanelet, desto fastere er madrassen. Man kan enkelt og raskt innstille på et høyt trykk, hvorav maksimalt trykk er 60. Man kan deretter tilbake stille madrassen via MEM-knappen.

Pumpen

Pumpen kan fylle inn og ut luft til ønsket trykk, samt memorere en foretrukken fasthet.

MEM-knappen (Memory) som stiller automatisk tilbake til innstilt trykk. På den måten er det lettere for pleiepersonell og bruker å stille tilbake madrassen etter bruk. Pumpen bruker kun strøm ved justering. Det følger med pumpeoppheng som standard slik at den kan henges opp på sengen.

Målgruppe

Madrasen er rettet mot brukere med mindre trykksår (opp til og med grad 2), eller fare for sår, forflytningsproblematikk og/ eller smerteproblematikk. RobinMedical egner seg også godt til tunge brukere da den har maksvekt på 340 kg.

Størrelser

Bredden: 80, 85 og 90.

Lengde: 200.



Vi tilbyr spesialmål på bestilling.

Vask

Madrasstrekket vaskes på 85°C i 10 minutter. Luftkammer, skum og pumpe desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel.

Inkontinenslaken

Elastisk trekk som er flammehemmende, pustende og resistent mot bakterier. Kan vaskes på 95°C, tørketromles, renses, steriliseres med damp og desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel. Trekket kan monteres i stedet for eller i tillegg til eksisterende trekk. Trekket er behandlet med Sanitized Silver teknologi. Denne innovative behandlingen av trekket benyttes på stoffet for å hindre veksten av mikroorganismer. Mikroorganismene drepes før de kommer i kontakt med brukeren. Det forhindrer spredning av mugg, lukt og bakterier. Inkontinenslaken kan bestilles som tilbehør.

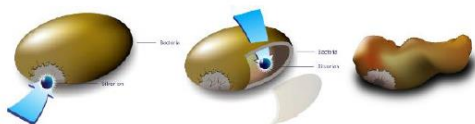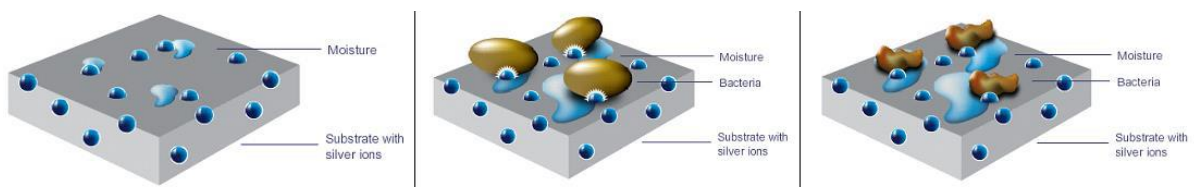

Effekten sølvet har på bakterier:

1. Cellenes membran destabiliseres
2. Respirasjon forhindres
3. Inntak av næringsstoffer hemmes
4. Celledeling forhindres



Sofies AS

Karoline Kristiansens vei 4, 0661 Oslo

Tlf. 67 11 10 80 Fax 67 11 10 81

post@sofies.no www.sofies.no